



Használati utasítás

PersonalFit™ Flex szívófej és csatlakozó könyvelem

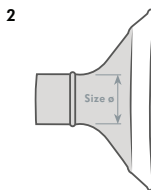

- Size 21 mm
- Size 24 mm
- Size 27 mm
- Size 30 mm

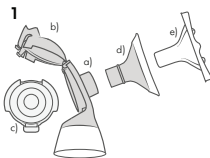

MAGYAR

A termék leírása

A többször használható PersonalFit Flex szívófej kompatibilis a Medela Swing Maxi Flex, Swing Flex, valamint Freestyle Flex mellszívóival. A PersonalFit Flex szívófejek különböző méretben érhetők el (lásd a „Termékváltozatok” részt). A mellszívó, illetve a szívókészlet működtetésére vonatkozó utasításokat a mellszívó kézikönyvében találhatja.

Rendelhetős

Shívófej:

A szívófejet a felhasználó mell- és mellbimbósövetére, és a PersonalFit PLUS, valamint a PersonalFit Flex csatlakozó egységéhez kell illeszteni úgy, hogy a mellén vákuum keletkezzen, és az anyatejet a csatlakozó egységbe lehessen vezetni.

Csatlakozó könyvelem:

A szívófejet a PersonalFit PLUS és PersonalFit Flex szívófejéhez, valamint a Medela palackjához kell illeszteni úgy, hogy a mellén vákuum keletkezzen, és az anyatejet a palackba lehessen vezetni.

Továbbá a csatlakozó egységnek szívárgásmotort gátat kell biztosítania a csatlakozó folyadékkal és vákuummal teli része és a szívócső (motoregység) között. Ezenfelül a csatlakozó egységnek biztosítania kell egy szívócső csatlakozó hüvelyt.

Felhasználási javallat

Lásd a termékleírásban felsorolt mellszívó használati útmutatóját.

Fontos biztonsági előírások

Vigyzat

- A szívófejet egy személyes egészségügyi kellék, amely kizárólag egy személy általi használatra készült. Az eszközt nem használhatja több anya.
- Csak eredeti Medela tartozékokat használjon.
- Vizsgálja meg minden használat előtt. Cserélje ki a penészes, sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.
- A csomagolást és az alkatrészeket soha ne hagyja felügyelet nélkül. Gyermekektől távol tartandó.
- Ha túl erősen nyomja a szívófejet a mellre, az kihat a tejáramlásra.
- Amennyiben problémák lépnek fel vagy fájdalmat érez, forduljon szoptatási tanácsadóhoz.

Tisztítási és higiénia

- Végezze el a Medela mellszívójának használati útmutatójában leírt összes lépést - szedje szét, mossa el és fertőtlenítse le.
- Minden használat után azonnal tisztítsa meg a szívófejet, ezzel elkerülheti a tejmaradék beszáradását és a baktériumok elszaporodását.
- A tisztításhoz csak ivóvíz minőségű vizet szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy kefe használatokor az alkatrészek ne sérüljenek meg.
- Ne használjon súroló hatású tisztítófolyadékokat/tisztítószeret a mellszívó vagy a szívókészlet alkatrészeinek tisztítására.
- Szerelje szét a szívókészletet részekre.

Mossa el – az első használat előtt és minden használat után

- Öblítse le az alkatrészeket hideg, tiszta, ivóvíz minőségű (kb. 20 °C-os) vízzel.

- Tisztítsa meg az összes részt bő, meleg (kb. 30 °C-os) szappanos vízzel. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószeret, lehetőleg mesterséges illat- és színezőanyagoktól mentes változatot (pH-semleges).
- Öblítse le az alkatrészeket 10–15 másodpercig hideg, tiszta, ivóvíz minőségű (kb. 20 °C-os) vízzel. Az elmosás után szárítsa meg.

Fertőtlenítse le – az első használat előtt

és naponta egyszer

- Öntsön a lábasba annyi vizet, hogy ellepje a szívófejet, és forralja legalább 5 percig. Forralás helyett mikrohullámú sütőben használjon Quick Clean tasakot az utasításoknak megfelelően.

Szárítás/tárolás

- Törölje szárazra tiszta ruhával, vagy hagyja egy tiszta ruhán száradni. A tiszta alkatrészeket tegye tiszta tárolótokába, vagy tartsa tiszta környezetben. Ne tartsa a nedves alkatrészeket légmentesen záródó tárolóban/táskaiban. Fontos, hogy minden maradék nedvesség megszáradjon.

Összeszerelés és használat

- A szívófejet és a mellszívó használatával kapcsolatosan további információkat a mellszívó, illetve a szívókészlet használati útmutatójában találhat.

A PersonalFit Flex szívófej méretének kiválasztása

A szívófej mérete változhat a mellszívás időszakai alatt. Ebben az időszakban mindvégig tökéletesen kell illeszkednie a szívófejnek. A megfelelően illeszkedő szívófej segít megelőzni, hogy a fejés alatt a tejcsatornák elszoruljanak, és ezáltal biztosítja a mell optimális kiürítését és a maximális tejszámot.

Megfelelően illeszkedő szívófej esetén a mellbimbó közepén helyezkedik el, és szabadon mozog.³ Még több információ olvasható a weboldalon: www.medela.com/personalfit

A termék leírása

PersonalFit Flex csatlakozó könyvelem (cikksz. 200.9728) és szívófej (cikksz. 200.9486 21mm; 200.9487 24mm; 200.9499 27mm; 200.9501 30mm)

a) csatlakozó könyvelem

b) fedél

c) membrán

d) szívófej

e) védőborítás – Az első használat előtt távolítsa el a védőborítást* a szívófejről, és dobja ki.

Termékváltozatok

- 101033956 – PersonalFit™ Flex szívófej S (Ø 21 mm)
- 101033990 – PersonalFit™ Flex szívófej M (Ø 24 mm)
- 101033995 – PersonalFit™ Flex szívófej L (Ø 27 mm)
- 101034000 – PersonalFit™ Flex szívófej XL (Ø 30 mm)
- 101034008 – PersonalFit™ csatlakozó

A szívófej anyaga:

polipropilén, hőre lágyuló elasztomer

A csatlakozó könyvelem anyaga:

polipropilén, szilikon

Ártalmatlanság:

Az országban érvényben lévő szabályozás szerint.

CE-jelzés a 93/42/EEK irányelv alapján



0123



Ez a szimbólum a gyártót jelzi.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a használati utasítást be kell tartani.

Ez a szimbólum az értékesítési cikkszámot jelöli.

Ez a CE-jelzés azt jelzi, hogy az eszköz megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsirányelv alapvető követelményeinek.

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a csomagolás olyan termékeket tartalmaz, amelyek az 1935/2004/EK rendeletnek megfelelően rendeltésként kerülnek értékesítésbe előkészítéssel.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz napfénytől távol tartandó.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az anyag újrahasznosítási eljárás része.

Ez a szimbólum kartoncsomagolást jelöl.

Ez a szimbólum a kezelési, szállítási és tárolási hőmérsékletkorlátokat jelöli.

Ez a szimbólum a kezelési, szállítási és tárolási páratartalom-korlátokat jelöli.

Ez a szimbólum a kezelési, szállítási és tárolási légköri nyomás korlátait jelöli.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt szárazon kell tartani.

Ez a szimbólum az egyedi GSI globális kereskedelmi cikkszámot jelöli (GTIN).

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem távolítható el a szelektálatlan települési hulladékkal együtt (csak az EU-ban).

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tárgyanyag eszköz átváltásán kezelendő.